



04/2024 SPLUT191S00
 Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.

Dati tecnici	SW-17 PLUS	SW-22 PLUS	SW-28 PLUS
Tensione di alimentazione	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Potenza nominale	2300 W		
Dimensioni esterne LxAxP	480 x 500 x 600 mm		
Dimensioni camera DxP	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso totale	51 kg	52 kg	53 kg
Capacità serbatoio	4,5 litri		
Autonomia (con acqua al livello max)	da 7 a 11 cicli	da 6 a 10 cicli	da 5 a 9 cicli

CICLO	Tipo ciclo	Tempo di Sterilizzazione (min.)	Tempi ciclo compresi di tempo di sterilizzazione, al netto del tempo d'asciugatura (min.)			
			SW-17 PLUS	SW-22 PLUS	SW-28 PLUS	Asciugatura *
134 °C UNIVERSALE	B	4	32	36	41	13-17
121 °C UNIVERSALE	B	20	45	49	54	13-17
134°C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134 °C SOLIDI IMBUSTATI	S	4	18	20	24	13-17
134 °C PRIONE	B	18	46	50	55	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Ciclo personalizzabile dall'utente con temperature 134 °C / 121 °C, tempi di processo a partire da 4' (134 °C) o 20' (121 °C) e asciugatura impostabile				
VACUUM TEST	TEST	18	18	19		x
HELIX/B&D TEST	TEST	20	24	28		x
VACUUM + HELIX/B&D TEST (eseguiti in sequenza)	TEST	42	46	51		x

* L'asciugatura varia in base al modello e al volume della macchina
 Nota: i tempi non considerano il tempo di preriscaldamento max (10min).
 Nota: i tempi possono variare in base al carico e all'alimentazione elettrica.
 Nota: i tempi dei modelli a 120V possono subire incrementi no ad un max. del 20%



SW-PLUS

TECNOLOGIA EVOLUTA



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
 CEFLA s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola (BO) - Italy
 t. +39 0542 653111
 f. +39 0542 653344
 sternweber@sternweber.com
 sternweber.com

Stabilimento / Plant
 Via Bicocca, 14/C
 40026 Imola (BO) - Italy
 t. +39 0542 653441
 f. +39 0542 653601



STERNWEBER.COM




Come funziona
A differenza delle autoclavi tradizionali, SW Plus non necessita di collegamento idrico esterno per il trattamento di acqua di rete. Grazie al filtro di demineralizzazione alloggiato nel serbatoio principale, l'utente può riempire quest'ultimo con semplice acqua del rubinetto. Ciò permette una elevata razionalizzazione degli spazi, lo snellimento dei processi ed un sensibile risparmio. Il sistema di filtraggio di SW Plus garantisce una semplicità operativa senza precedenti.

Efficienza e risparmio
Mai prima d'ora una sterilizzatrice ha avuto performance così elevate e costi d'utilizzo talmente bassi. Lasciando al filtro di SW Plus il compito di demineralizzare l'acqua, l'utilizzatore non dovrà approvvigionarsi di acqua demineralizzata; sarà sufficiente riempire il serbatoio della macchina con acqua del rubinetto. Lo stoccaggio delle taniche, il deterioramento della componentistica interna delle macchine causato dalla scarsa qualità dell'acqua, saranno da oggi solo un ricordo.



Display LCD
SW Plus è la sterilizzatrice intelligente, strumento di lavoro indispensabile, che garantisce prestazioni eccellenti anche grazie al display LCD touch a colori, con interfaccia utente semplice ed intuitiva. Ogni controllo è rappresentato da icone che rendono immediata la lettura dello stato della macchina.

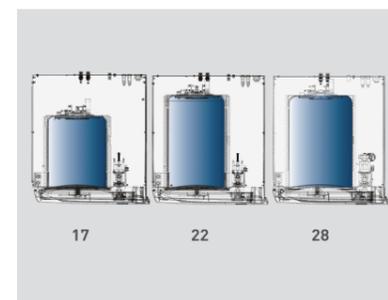

3 volumi, un'unica dimensione
17, 22 e 28 litri, questi i volumi disponibili per la gamma SW Plus. Tre diverse capacità per permettere all'utente di scegliere la macchina più adatta alle proprie necessità. Le dimensioni esterne, identiche per le tre macchine, consentono una semplice installazione. Cinque i vassoi per i modelli 17 e 22 litri, sei, invece, per la versione 28 litri.



Software DataSter per il download automatico
Fornito in dotazione con la macchina, DataSter permette il download automatico dei report cicli direttamente su una cartella di rete o del PC. L'autoclave, a fine ciclo, invia il file PDF alla cartella selezionata.



Di.V.A.
Digital Virtual Assistant, questo l'acronimo di Di.V.A. Il primo sistema di controllo e tracciabilità dei dispositivi di sterilizzazione su Cloud. I dati, una volta salvati, saranno a disposizione degli operatori accedendo alla pagina web dedicata.



Promemoria test
Impostando la funzione a display, SW Plus segnalerà all'operatore la necessità di effettuare Vacuum Test, Helix Test o Bowie & Dick test. Non sarà più possibile, quindi, dimenticare queste importanti operazioni.



Software di tracciabilità
MyTrace, è il software di tracciabilità disponibile per SW Plus. Utilizzando questo programma è possibile associare il set di strumenti sterilizzati al paziente tramite codice a barre. Insostituibile mezzo per completare il processo di sterilizzazione ed assicurare tutela legale all'odontoiatra.



Assistenza tecnica da remoto con Easy Check
Tutte le autoclavi della gamma SW Plus sono dotate di WiFi integrato e porta Ethernet. Collegate ad internet, attivando il servizio Easy Check, possono ricevere assistenza da remoto. Si riducono drasticamente i tempi d'intervento permettendo al tecnico di mantenere le macchine costantemente in efficienza.



USB
I report cicli sono salvati automaticamente all'interno della memoria dell'autoclave e successivamente possono essere scaricati attraverso la porta USB posta sul frontale. I file, in formato PDF, potranno essere visualizzati su qualsiasi dispositivo.



Stampante
A completamento della gamma SW Plus, è disponibile come accessorio opzionale una stampante esterna in grado di fornire report o etichette con codice a barre.